

**MWM**  
METALLWARENFABRIK MÜHLACKER  
Alfred Marx e.K.  
Kisslingweg 48  
D-75417 Mühlacker

Telefon: +49 7041 8716-0  
Telefax: +49 7041 8716-200  
Internet: [www.mwm-muehlacker.de](http://www.mwm-muehlacker.de)  
E-Mail: [info@mwm-muehlacker.de](mailto:info@mwm-muehlacker.de)

Registergericht: Mannheim HRA 510007  
USt-Id.-Nr.: DE 195 950 528

## Aufbereitungshinweise

Die Spritzenauflagen mit der Art.-Nr. 01905 und 01907 bestehen aus dem Werkstoff 1.4301 Kurzname X5CrNi18-10, dabei handelt es sich um einen rostfreien Edelstahl.

Dieser Edelstahl ist uneingeschränkt autoklavierbar. Beim Aufbereiten und Sterilisieren müssen sämtliche Vorschriften eingehalten werden, es dürfen keine aggressiven Reinigungsmedien verwendet werden, die den aufgeführten Werkstoff angreifen!

Der Edelstahl kann bis 190 °C erwärmt werden, eine leicht gelbe Verfärbung hat keine negativen Eigenschaften zur Folge.

Die Spritzenaufgabe ist kein Medizinprodukt!

Im Anhang MWM\_S42 finden Sie noch wissenswertes, sowie Pfllegetipps zum Werkstoff Edelstahl.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus Edelstahl, von uns entschieden haben und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

 **Hier bestellen!**

 **PRAXISDIENST**  
Medizinprodukte seit 1953