

## 1 ÜBER DIESE KURZANLEITUNG


Diese Kurzanleitung beschreibt, wie die OtoAccess® Database und die Software MAICO Sessions installiert werden, wenn sie zusammen gekauft werden.

## 2 BEIM KAUF MITGELIEFERT

1. **OtoAccess® Database USB-Speicherstick** mit Setup und Benutzerhandbuch
2. **MAICO Sessions USB-Speicherstick** mit Setup, Benutzerhandbuch und Database Converter
3. **USB-Kabel**

**HINWEIS:** Der Database Converter ist ein Programm zur Übertragung von Patienteninformationen und Messergebnissen aus der MAICO-Datenbank in die OtoAccess® Database. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung zum DB-Converter.

## 3 OTOACCESS® DATABASE INSTALLIEREN

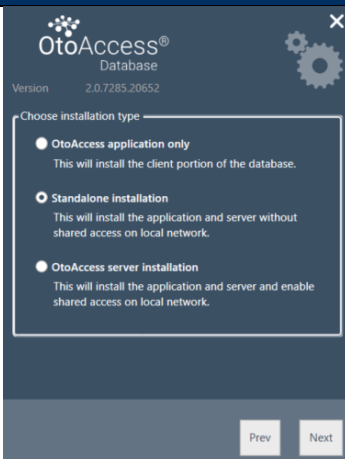

1. Stecken Sie den OtoAccess® USB-Speicherstick in den Computer
2. Laden Sie das Benutzerhandbuch vom USB-Speicherstick herunter und lesen Sie die kompletten Setup-Anweisungen.
3. Wählen Sie **OtoAccess.exe** auf dem USB-Speicherstick.
4. Wählen Sie die Installationsart, die ihren Büroanforderungen entspricht.

**HINWEIS:** Es wird empfohlen, die OtoAccess® **Standalone installation** (Standalone-Installation) für die direkte Installation auf einem einzelnen PC zu wählen. Wenn eine Netzwerkinstallation bevorzugt wird, wählen Sie **OtoAccess server installation** (OtoAccess-Serverinstallation) oder **OtoAccess application only** (nur OtoAccess-Anwendung). Weitere Informationen finden Sie im OtoAccess®-Benutzerhandbuch.

## 4 OTOACCESS® DATABASE-LIZENZ

Hinweis: Für jeden PC ist eine individuelle Lizenz erforderlich. Auch für die Server-Installation ist eine Lizenz erforderlich.

Sobald die Installation der Software abgeschlossen ist, muss die Lizenzregistrierung abgeschlossen werden. Es gibt zwei Optionen.

### Keine Internetverbindung:


1. Vollständige Lizenzregistrierung auf einem zweiten Computer
2. Gehen Sie zur Website: **otoaccess.com**
3. Wählen Sie **Lizenz aktivieren**
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung der OtoAccess® Database abzuschließen.

### Internetverbindung:

1. Öffnen Sie OtoAccess® und navigieren Sie zu **Einstellungen → Lizenz**.



2. Vollenden Sie den Abschnitt **Lizenz aktivieren** und wählen Sie **Erneuern**.

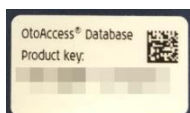


Der Lizenzproduktschlüssel ist auf der Rückseite der Verpackung der OtoAccess® Database aufgedruckt.

## 5 MAICO SESSIONS INSTALLIEREN

1. Stecken Sie den **MAICO Sessions USB-Speicherstick** in den Computer.
2. Laden Sie das Benutzerhandbuch vom der USB-Speicherstick herunter und lesen Sie es durch, um vollständige Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten.
3. Schließen Sie alle geöffneten oder laufenden Programme.
4. Wählen Sie **SessionsSetup.exe**, um den Installationsprozess zu starten.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

## 6 WIE MAN SESSIONS STARTET

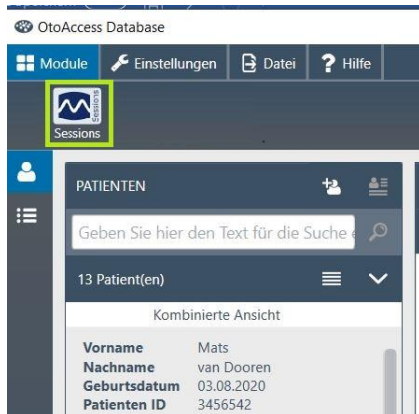

1. Starten Sie die OtoAccess® Database.
2. Wählen Sie einen Patient aus.
3. Gehen Sie zu Module und wählen Sie Sessions.
4. Sessions öffnet.

**Hinweis zur Marke:** OtoAccess® ist eine in den USA und Europa eingetragene Marke der OtoAccess® A/S.