

4. Störende Substanzen: Die folgenden Verbindungen wurden mit dem COVID-19 Antigen-Schnelltest (kolloidales Gold) getestet und es wurden keine Störungen beobachtet.

Störende Substanzen	Konzentration
Curitip*	32µg/lfN*
Ascorbinsäure	20mg/dL
Ibuprofen	200µg/dL
Bilirubin	60mg/dL
Chloramphenicol	3µg/dL



WARNUNGEN & VORSICHTSMAßNAHMEN ³

1KIULQYLWURGLDQRVWLVEFKHFNHUUHVWLWVQKIUGHQSURIHVVLRRHQOOHQ*HEUDEKKEHVWLPPWQGEHVFKUIQNWVLFKDNPHGLJQLVFN
 HROHQLHGLHQOHLWQJUGLHNRUUHNWHDHUNQG9HUIHQGQGHV.LWVGDGLHVVWUHEQELVVHVRQVVEHHLQIOXVVWZUGHQNQWHQ
)ULHUHQELHGLHSHDHQLHQQLFKWHLQ
 FKWHQELHGLHSHDHQLHQYRU.RQWDPLQDWLRQ
 DV.LWHQWKIOW3URWHLQPDWHULDOWHLULVFKHQEVSUQVFKDQGHOOELHHVDOVREHLEIDOO
 LHLP3URHVVVYHUHQGHWHQOQDWHULDOLHQNQQWHQLQHNWLNVHLQDKHUVROOWHQELHPIGHEQLRORLVFKHQELFKHUKHLWVDQIRUGH
 HIKUOLFKHVKVWDQHQEHEKQGHOWZUGHQ
 9HUIHQGHQELHGLHVVWVNDVVHWWHQLFKWHQGHUMHWHOEHVFKIGLWRGHUGDVLEHHEURFKHQLVW
 LH3NHUONQLVWQLFKW9HUIHKUHLQHW

BIBLIOGRAPHIE³








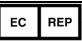





:HLV6 HLERZW/ RQRDYLSOWKRHQHVEV9LUX 5HV 30; 2%
 K 6 :RQJ * KL : HVDO(SLGHPLRORHQHWLHFRPELQDWDQSDWKRHQHIERURQDYLUHQGOLFURELRO 30;
 2MWLP
 K - L) KL ≠ 2ULLQDQGHYROWIRHQDWKRHQHIERURQDYLUHQGOLFWURELRO 2V

2 STICHTAG UND VERSION³

Stichtag⁴

Xgtuiqp.2⁷

 **Anmerkung:** Bitte beziehen Sie sich zum Verstehen der Symbole auf die folgende Tabelle.

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	Haltbarkeitsdatum
	Chargennummer
	Katalognummer
	Warnung
	Hersteller
	Herstelldatum
	EU-Ansässiger Bevollmächtigter
	In-vitro-diagnostisches medizinisches Gerät
	Temperaturlimit
	Nicht wiederverwenden
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Direktive 98/79/EC für in-vitro-diagnostische Geräte
	Tests pro Kit



Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd.
 Adresse: 10th Floor ,Administration
 Building, NO.519,XingGuo RD.,Yuhang
 Economic and Technological Development
 Zone, Hangzhou , Zhejiang, China, 311188
 E-mail: market@joinstar.cn
 Tel: 0086-571-89023160
 Fax: 0086-571-89028135



Lotus NL B.V.
 Adresse: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
 2595AA, The Hague, Netherlands.
 E-mail: peter@lotusnl.com
 Tel: +31644168999

