



Navigationstaste

Intuitive Farbskala
(zur Interpretation
Ihrer Messwerte)


Navigationstaste

Auswurfknopf

Geführter
Teststreifeneinschub

Teststreifen mit gelber
Blutauftragsfläche

Vier Schritte zur Blutzuckermessung

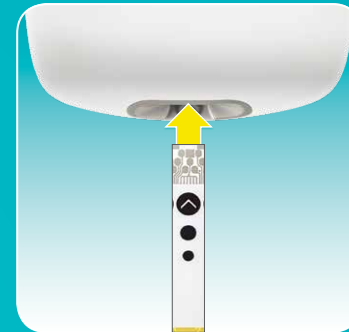


Teststreifen einführen

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie mit dem Messen beginnen. Das Messgerät schaltet sich ein, wenn Sie den Teststreifen in das Gerät einführen.



Blut gewinnen

Wenn das blinkende Tropfensymbol erscheint, verwenden Sie die Stechhilfe zur Blutprobenentnahme.

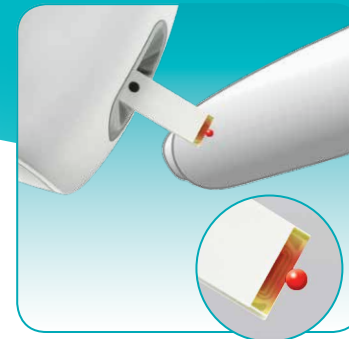

Blut auftragen

Berühren Sie den gelben Rand des Teststreifens mit dem Blutstropfen. Entfernen Sie Ihren Finger vom Teststreifen, sobald das blinkende Sanduhrsymbol auf dem Display erscheint.



Testergebnis ablesen

Das Testergebnis erscheint in weniger als 4 Sekunden auf dem Display. Der Pfeil zeigt an, ob Ihr Testergebnis über, innerhalb oder unter Ihrem Zielbereich liegt.