



Controlbox CB22 V3

Tastenfunktionen

Hier bestellen!

 PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953

Taste	Funktion
'▶'	<p>Controlbox ausgeschaltet: Auswahl der Therapie (je nach Variante: 1-9, A, C, E, F, H, J, L) Taste so oft betätigen, bis Therapie in der Anzeige erscheint. Anzeige blinkt daraufhin 2 mal. Danach wird die Therapie gestartet. Auswahl der Therapie '0' ⇒ Standby.</p> <p>Während der Therapie:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Kurzer Tastendruck < 1 Sekunde:</i> Umschalten der Infrarotwärme FIR, angezeigt durch den Dezimalpunkt.• <i>Langer Tastendruck > 1 Sekunde:</i> Pause. Therapie wird pausiert. Nach erneuter Betätigung des Tasters wird die Therapie fortgesetzt. Nach 10 Minuten Pause wechselt die Controlbox in den Standby Modus.
'X'	<ul style="list-style-type: none">• Abbruch der Therapie.• Anzeige des Ladezustands der Batterie für ca 2 Sekunden.

Voreingestellte Therapien

NR	Technik	Zeit in Min	LED	FIR
1	Dauerlicht LED	20	X	
2	Dauerlicht LED	20	X	X
3	Gepulst - 5 Min. Licht, 1 Min. Pause	15	X	X
4	Gepulst - 10 Sek. Licht, 10 Sek. Pause	15	X	X
5	Gepulst - 1 Hz	20	X	X
6	Gepulst - 2,5 Hz	20	X	X
7	Gepulst - 5 Hz	20	X	X
8	Infrarotwärme Dauerbetrieb	30		X
9	Gepulst - 2,5 Hz nur LED	20	X	



100 % - Das ist die Zufriedenheit, die wir Ihnen mit unseren Produkten wünschen. Sollten trotzdem einmal Probleme auftauchen, so kontaktieren Sie uns bitte unter:

E-Mail: service@moyave.com
 Telefon: +49 8124 91890 40

Anzeige

Anzeige	Beschreibung
'0'	Therapie kann nicht ausgewählt werden, da der Ladezustand der Batterie zu niedrig ist ⇒ Ladegerät anschließen.
'1-9' 'A,C,E,F' 'H,J,L'	Therapie wird ausgeführt.
'-', '=', '≡'	Ladezustand der Batterie. ' _ ': Batterie fast leer. Therapie wird voraussichtlich nicht vollständig ausgeführt. '=': Ladezustand gut. Therapie wird voraussichtlich vollständig ausgeführt. '≡': Batterie vollständig geladen. Blinkend: Batterie wird geladen. Nach Beendigung des Ladevorgangs schaltet sich die Anzeige aus.
'P'	Pause. Pad nicht verbunden. Nach dem Anschließen eines Pads wird eine bereits begonnene Therapie durch betätigen der Taste ' ▶ ' fortgesetzt.
'0-H' wechselnd	Therapie abgebrochen. Controlbox zu warm.
'0-' wechselnd	Therapie abgebrochen. Batterie entladen ⇒ Ladegerät anschließen.
'.'	Infrarotwärme FIR eingeschaltet