

**mediRegis® C**

ist in 3 Größen erhältlich  
und sofort anwendungsbereit

Regenerationsvlies einzeln, steril verpackt

### Packungsgrößen

10 x 10 mm | 10 Stück | Ref 011001  
EAN 0701197 926 295

10 x 20 mm | 10 Stück | Ref 011002  
EAN 0701197 926 301

20 x 20 mm | 10 Stück | Ref 011003  
EAN 0701197 926 318



medichema GmbH  
Weststraße 57  
09112 Chemnitz / Germany  
Tel.: +49 (0) 371 90 96 838 • Fax: +49 (0) 371 90 96 839  
info@medichema.com • www.medichema.com



**PRAXISDIENST**  
Medizinprodukte seit 1953

**Hier Bestellen!**

**Das  
implantierbare  
Kollagenvlies**

**mediRegis® C**

**für eine optimierte Knochen-  
und Weichgeweberegeneration  
in der Oral- und Implantat-  
chirurgie**

## mediRegis® C

### Das implantierbare Kollagenvlies

**mediRegis® C** ist ein implantierbares und vollständig resorbierbares bio-porcines Kollagenvlies. Das Vlies weist eine überragende Biokompatibilität aus. Das Material ist frei von BSE-Pathogenen, Bakterien und Viren. **mediRegis® C** ist sehr gut verträglich, wirkt entzündungshemmend und fördert den Wundheilungsprozess.

### Extraktionsmanagement mit **mediRegis® C** bei Patienten mit Gerinnungsproblemen

**mediRegis® C** sichert aufgrund seiner Fähigkeit, ein Vielfaches seines Volumens an Flüssigkeit zu binden, eine schnelle Blutstillung und verhindert Nachblutungen insbesondere bei Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Es verbessert zudem die Wundheilung und verringert Schmerzen.

### Socket Preservation mit **mediRegis® C**

**mediRegis® C** verbessert die Voraussetzungen für die nachfolgende Implantierung durch den längeren Erhalt des Blutkoagels in der Extraktionsalveole und damit einer optimierten Knochen- und Weichgeweberegeneration.

**mediRegis® C** dient als Matrix und Leitschiene für die initiale Geweberegeneration. Unter der Voraussetzung der atraumatischen Zahnextraktion und Erhalt der bukkalen Knochenlamelle schafft **mediRegis® C** gute Bedingungen zum Erhalt der Gewebestrukturen und zur Verhinderung kollabierender Knochenwände. Die Versorgung der Extraktionsalveole mit **mediRegis® C** trägt zur Vermeidung der horizontalen und vertikalen Resorption bei und führt zur Geweberegeneration der Alveole. Der Erhalt des Kieferkamms ermöglicht eine verbesserte prothetische Versorgung unter ästhetischen Gesichtspunkten bzw. ermöglicht eine optimierte Implantatversorgung.

### Verschluss von Weichgewebe-Defekten mit **mediRegis® C**

**mediRegis® C** eignet sich für die Versorgung und dem Verschluss von Weichgewebe-Defekten, wie zum Beispiel orale Wunden oder Biopsie-Entnahmestellen. Weichgewebe-Dehiszenzen können mit **mediRegis® C** geschlossen werden. **mediRegis® C** schützt beim Sinuslift die Schneidersche Membrane vor Perforation.



### Indikationen im Überblick

- Hämostyptische Wundversorgung der Extraktionsalveole
- Reduzierung von Blutungen und Nachblutungen
- Geweberegeneration der Extraktionsalveole (Socket Preservation)
- Vermeidung von Wundinfektionen nach Zahnextraktion
- Schutz der Schneider'schen Membrane vor Perforation
- Biopsieentnahmestellen
- Orale Wunden
- Kleinere knöcherne Defekte
- Weichgewebe-Dehiszenzen
- Förderung der Wundheilung und Unterstützung der Geweberegeneration

