



## Dosierung

### Harvard Cement schnell härtend

- Für Befestigungen:  
Pulver 1,8 g : Flüssigkeit 1,0 g

### Harvard Cement normal härtend

- Für Befestigungen :  
Pulver 1,5 g : Flüssigkeit 1,0 g

- Für Unterfüllungen :  
Pulver 2,1 g : Flüssigkeit 1,0 g

**Bitte beachten Sie die  
Gebrauchsanweisung !**



1. Dosieren auf sauberer, trockener Glasplatte von ca. 23 °C.



2. Portionieren Sie 4 Portionen zu : 1/2, 1/4, 1/8, 1/8.



3. Mischen : Beginnen Sie mit dem ersten 1/8, Dauer 15 Sekunden.



4. Zweites 1/8 innerhalb weiterer 15 Sekunden mit ausreichenden Bewegungen einmischen.



5. Das 1/4 in die Mischung ziehen.



6. Mischung mit Druck und flachem Spatel innerhalb der nächsten 30 Sekunden herstellen.



7. Die restliche 1/2 innerhalb 30 Sekunden einmischen.



8. Dazu die ganze Plattenfläche nutzen.



9. Gebrauchsfertige Mischung nach 90 Sekunden.