

# HEINE® iC1 Quick Start Guide



Download the HEINE iC1 App in the AppStore.

*Download der HEINE iC1 App im AppStore.*



Place the iPhone\* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.

*iPhone\* in die passende Schale einsetzen bis es einrastet. Darauf achten, dass die Kamera an der richtigen Position ist.*



Attach the mobile phone case to the HEINE iC1 until it engages.

*Einsetzen der Adapterschale auf das HEINE iC1, bis es einrastet.*




Switch on.

*Einschalten.*

\*Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



The device automatically starts in polarisation mode. The toggle function allows you to alternate between polarised images and immersion images. *Das Gerät startet im Polarisationsmodus. Mit der Toggle-Funktion kann zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahme umgeschaltet werden.*

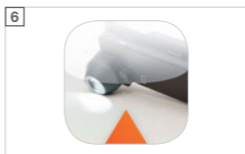

Start the HEINE iC1 App on your iPhone\*. *Starten Sie auf ihrem iPhone\* die HEINE iC1 App.*



Press your thumb through the opening of the mobile phone case to disengage the iPhone\*.

*Mit dem Daumen durch die Aussparung das iPhone\* aus der Schale drücken.*



Charging the HEINE iC1 with the supplied USB cord.

*Laden des HEINE iC1 mit dem mitgelieferten USB-Kabel.*

# Cleaning and Disinfection

## Reinigung und Desinfektion



Please note: To prevent damage to the device, do not spray disinfectants or detergents directly onto the contact plate.

*Bitte beachten Sie, dass Desinfektions- und Reinigungsmittel nicht direkt auf die Kontaktscheibe aufgesprüht werden dürfen um Schäden am Gerät zu vermeiden.*

Recommended cleaning agent for Dermatoscope: Neodisher® MediClean

Recommended disinfectant agent for Dermatoscope: quaternary ammonium compounds (e.g. Cleanisept® Wipes or Microbac® Tissues)

Recommended cleaning agent for contact plate: Neodisher® MediClean

Recommended disinfectant agent for contact plate: quaternary ammonium compounds (e.g. Microbac® Tissues)

*Empfohlene Reinigungsmittel Dermatoskop: Neodisher® MediClean*

*Empfohlene Desinfektionsmittel Dermatoskop: quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Cleanisept® Wipes oder Microbac® Tissues)*

*Empfohlene Reinigungsmittel Kontaktscheibe: Neodisher® MediClean*

*Empfohlene Desinfektionsmittel Kontaktscheibe: quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Microbac® Tissues)*