

# PASSAU IMPEX

C 21-23, Nishtar Road, S.I.E., Sialkot-Pakistan.

## Gebrauchsanweisung für Laryngoskope

### INSPEKTION UND PRÜFUNG

Vor der ersten Verwendung und nach jeder weiteren Verwendung sollte das Gerät zerlegt, gereinigt, desinfiziert und/oder sterilisiert und anschließend inspiziert und getestet werden, um die Integrität des Systems sicherzustellen. Bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten oder Anomalien darf das Gerät nicht verwendet werden; wenden Sie sich an den Hersteller.

### WARTUNG

#### Reinigung, Desinfektion und Sterilisation

Unmittelbar nach dem Gebrauch sollten die Instrumente in reinem Leitungswasser gespült werden, um Rückstände zu entfernen. Das Gerät sollte dann in Seifenwasser mit einer weichen Bürste sanft geschrubbt werden, um eine gründliche mechanische Reinigung durchzuführen. Spülen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab und trocknen Sie es mit einem weichen Handtuch gründlich ab. Die Lagerfähigkeit beträgt 5 Jahre.

#### Desinfektion/ Sterilisation:

**1. Ethylenoxidgas (ETO) - ist geeignet.**

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die Temperatur von 130 oF und den Druck von 8 p.s.i. Die Belichtungszeit muss genau kontrolliert werden. Es werden 3 Sterilisationszyklen durchgeführt.

**2) Autoklave (Dampf)**

Die Teile können bei 121° C (250° F) für 15 Minuten oder 134° C (273° F) für 3 1/2 Minuten dampfautoklaviert werden. Einwickeln und Kontakt mit anderen Instrumenten vermeiden. Es werden 3 Sterilisationszyklen durchgeführt.

#### Warnungen/ Vorsichtsmaßnahmen:

- Das Blitzautoklavieren und die Heißluftsterilisation werden nicht empfohlen.
- Nach der Gassterilisation muss das Gerät ordnungsgemäß belüftet werden, um das gesamte Restgas zu entfernen.
- Teile sollten vor der Wiederverwendung immer überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie in unverbeultem, neuwertigem Zustand sind.
- Die oben aufgeführten Sterilisationsrichtlinien, die von uns zur Verfügung gestellt werden, sind als nur als Anregung gedacht. Die Sterilisation muss gemäß dem vom Krankenhaus genehmigten Protokoll durchgeführt werden. Dieses muss durch das Krankenhaus und/oder den Gerätehersteller validiert werden.

### BETRIEBSANLEITUNG

- a. Wählen Sie die passende Klingengröße aus.
- b. Setzen Sie das Messer auf den Hakenstift.
- c. Wenden Sie Kraft nach oben an, um das Messer in die Betriebsposition zu bringen.
- d. Wenden Sie Kraft nach unten an, um das Messer in die Stand-by-Position zu bringen.
- e. Das Aufbereitungsverfahren und die beschriebenen Geräte und Materialien müssen von Personen befolgt und durchgeführt werden, die in der Aufbereitung von Medizinprodukten geschult und vertraut sind.
- f. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für deren ordnungsgemäße Zubereitung und Verwendung.
- g. Nur geschultes Personal darf ein Laryngoskop zur Intubation verwenden.
- h. Laryngoskopspatel, die bei Patienten mit Creutzfeldt-Jakob-Krankheit verwendet wurden, dürfen nicht wiederaufbereitet werden. Diese Instrumente sollten entsorgt werden.
- i. Entsorgen Sie jedes Bauteil, das Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß aufweist.
- j. Lampen, die unbeleuchtet bleiben, können so viel Hitze erzeugen, dass sie Verbrennungen verursachen.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Die Batterien und die Lampenkammer des faseroptischen Laryngoskopgriffs sind nicht autoklavierbar. Entfernen Sie daher bitte die Batterien aus beiden Griffstypen und die Glühbirnenkammer aus dem Lichtleitergriff. Sie können die traditionellen Laryngoskopspatel mit Glühbirnen in der ETO-Gassterilisation oder im Autoklaven sterilisieren, aber stellen Sie bitte vor der Sterilisation sicher, dass jede Glühbirne fest genug angezogen ist und eine Gummidichtung hat. Verwenden Sie nur die angegebenen Lampen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Beschädigung oder schlechten Leistung dieses Geräts führen. Verwenden Sie nur pH-neutrale (6,0-8,0) enzymatische Reiniger. Verwenden Sie nur pH-neutrale (6,0-8,0) Ortho-Phthalahyde (OPA) oder Glutaraldehyd-Desinfektionsmittel. Verwenden Sie keine anderen Reiniger oder Desinfektionsmittel.

# **PASSAU IMPEX**

C 21-23, Nishtar Road, S.I.E., Sialkot-Pakistan.

## **Gebrauchsanweisung für Laryngoskope**

### **Informationen zum Akku**

Toshiba R 14SG SIZE C 1,5 V

Manuell in den Griff einsetzen

Achten Sie darauf, dass die Spannung von wiederaufladbaren Akkus schnell abfallen kann.