

# SOS Zahnbox

## Rettungsbox für Zahnunfälle

### Im Falle eines Zahnunfalls:

- Ausgeschlagenen Zahn oder Zahnbruchstück sofort suchen und unverzüglich in die SOS Zahnbox legen.
- Zahn nicht an der Wurzel oder Bruchfläche berühren!
- Zahn nicht reinigen oder desinfizieren!
- Die SOS Zahnbox öffnen, den Zahn in die Lösung legen und wieder verschließen.
- Patientenname, Datum und Uhrzeit auf dem Flaschenetikett vermerken. Schnellstmöglich eine Zahnarztpraxis oder Zahnklinik aufsuchen.

### Information für den behandelnden Arzt:

Den Zahn vor der Replantation gründlich mit NaCl-Lösung spülen.

Die Aufbewahrungslösung der SOS Zahnbox hält die Zellen an der Zahnwurzel bei Zimmertemperatur bis zu 48 Stunden lebensfähig.

Die Chancen einer erfolgreichen Replantation erhöhen sich, wenn der Zahn bzw. das Zahnteil nach 24 Stunden in eine neue SOS Zahnbox umgelagert werden.

### Anwendungsgebiete

Aufbewahrung von

- ausgeschlagenen Zähnen – die wieder zurückgepflanzt werden
- extrahierten Zähnen – die zurück gepflanzt oder verpflanzt werden
- Zahnbruchstücken – die wieder angefügt werden

Verfallsdatum beachten.

Die miradent SOS Zahnbox beinhaltet eine gebrauchsfertige Lösung. Wird sie trüb und verfärbt sich von hellrot nach gelb, ist die Flüssigkeit kontaminiert und darf nicht mehr verwendet werden.

Dieses Produkt ist für eine einmalige Verwendung bestimmt und nach dem Öffnen nicht mehr sterilisierbar. Bei einer Wiederverwendung ist die Keimfreiheit des Produktes nicht mehr garantiert und es besteht Infektionsgefahr.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagertemperatur: 4°C bis 25°C

Nicht zum Einnehmen.

Nur zum Gebrauch öffnen!

Stand: 03/2012

2009020406-03



Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstraße 1

47269 Duisburg, Germany

[www.hagerwerken.de](http://www.hagerwerken.de)

[www.zahnunfall24.de](http://www.zahnunfall24.de)



REF 630 125



CE 0197