

Heyfair

# STERI COACH

Training der  
Händedesinfektion



Hygienetraining  
**Sinnvoll und verpflichtend** (deshalb)



Die hygienische Händedesinfektion ist die effektivste Einzelmaßnahme, um Erregerübertragungen aktiv zu vermeiden.

Der scheinbar einfache Ablauf einer Händedesinfektion ist jedoch überraschend fehleranfällig: man benötigt eine erstaunliche Menge Hintergrundwissen und Training, um nicht nur richtig, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt zu desinfizieren.

**Praktisches Hygienetraining** wird darum dringend vom Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlen und ist damit verbindlich für

Einrichtungen des Gesundheitswesens:

*„Zur Gewährleistung der Compliance der Händehygiene ist mindestens jährlich (und zeitnah bei Hinweisen auf Probleme in diesem Bereich) eine Schulung aller Mitarbeiter zu den Indikationen der Händedesinfektion **in Verbindung mit einem Training** (z.B. mit fluoreszierendem Farbstoff im Desinfektionsmittel) zu gewährleisten.“*

RKI: „Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“, S. 1209 (2016)

Der Einsatz dieser Fluoreszenz-Methode benötigt jedoch Zeit. **Viel Zeit...**



## Training mit SteriCoach®

# Effizienz durch Teamarbeit

Damit Hygienegrundlagen praktisch und schnell vermittelt werden können, haben wir SteriCoach® entwickelt. Die Trainingsflüssigkeit macht die korrekte Händedesinfektion durch eine pinke Einfärbung deutlich. Das Besondere: ein Naturfarbstoff.

**Dieser wird erst beim Trocknen sichtbar.**

Damit kann die Qualität der Einreibetechnik erst dann mit bloßem Auge festgestellt werden, wenn die Hände wieder trocken sind. SteriCoach® ist deshalb überall einsetzbar, ob im Seminarraum oder im Grünen.

Der Zeitaufwand pro Training liegt bei weniger als 5 Minuten, auch wenn 10, 20 oder 50 Personen trainiert werden sollen.

Der Schlüssel zu diesem Effizienzgewinn liegt in der Teamarbeit:

Die Teilnehmenden werden in Gruppen geteilt und prüfen die richtige Einreibetechnik und Dosiermenge untereinander. Dieser freundschaftliche Wettkampf um die am Besten benetzten Hände macht Spaß, passiert auf Augenhöhe und führt zu nachhaltigem Lernen.



Funktionsweise SteriCoach®

## Aha-Erlebnis in drei einfachen Schritten

Schritt 1

## Hände einfärben

SteriCoach® wird aufgetragen und wie gewohnt auf den Händen verteilt. Nachdem die Flüssigkeit getrocknet ist, nimmt die Färbung weiter zu und eventuelle Benetzungslücken werden sichtbar.



**Hinweis:** Die Dauer des Nachfärbens ist unabhängig zur erforderlichen Einwirkzeit.

## Schritt 2

# Ergebnis prüfen

### Vollständige Benetzung

Nun kann die Vollständigkeit der Benetzung kontrolliert werden. Nicht gefärbte Hautareale weisen auf Fehler bei der Einreibetechnik hin.



### Wirksamkeit/Dosiermenge

Anhand einer Farbkarte wird die Wirksamkeit festgestellt. Sind Ihre Hände intensiv pink gefärbt, haben Sie korrekt dosiert und somit die erforderliche Wirksamkeit erreicht.



### Empfehlung

Zeit sparen und Lerneffekt steigern:  
trainieren Sie einfach in Gruppen.



### Schritt 3

## Hände entfärben

Beim Auftragen der Entfärbelösung werden benetzte Stellen sofort entfärbt. Die Einreibetechnik kann so erstmals durch direkte Beobachtung überprüft und intuitiv optimiert werden.



### Vorteile von SteriCoach®

## Umfangreich und effizient trainieren



### Wiederholt anwendbar

Weil keine Meister vom Himmel fallen: Mit SteriCoach® können Sie so oft trainieren, bis eine gute Technik verinnerlicht wurde.



### Effektiv und Effizient

Schulen Sie beliebig viele Personen gleichzeitig – wo auch immer Sie möchten. Ein Durchlauf dauert nur fünf Minuten.

Auch bei der Händedesinfektion:

# Die Dosis macht die Wirkung


Aber wieviel Desinfektionsmittel brauchen Ihre Hände?

Die korrekte Dosiermenge hängt von der Handgröße ab und ist gar nicht so einfach festzustellen. Das Problem: Ist die Dosis zu klein, ist auch die Wirksamkeit reduziert.

SteriCoach® zeigt Ihnen durch die Intensität der Einfärbung und einer Referenz-Farbkarte, ob Sie korrekt dosieren. Sind Ihre Hände nach der Anwendung nur blass gefärbt, wurde zu wenig Flüssigkeit aufgetragen.

Vorläufige Studien (n=19) weisen eindrucksvoll auf einen direkten Zusammenhang von Farbtintensität und biozider Wirksamkeit hin. Lesen Sie hier die Zusammenfassung:

[www.heyfair.de/wirksamkeit](http://www.heyfair.de/wirksamkeit)

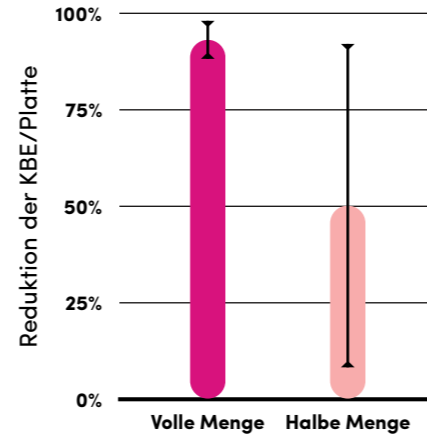

**0%**  
der erforderlichen  
Mindestmenge



**50%**  
der erforderlichen  
Mindestmenge  
**Ø Keimreduktion: 50%**  
(SD: 42%)



**100%**  
der erforderlichen  
Mindestmenge  
**Ø Keimreduktion: 93%**  
(SD: 5%)

## Inhaltsstoffe


# Natürlich natürlich. 100% Naturfarbstoff.

Aus Überzeugung verzichten wir auf künstliche Farbstoffe. Die zeitverzögerte Ein- und restlose Entfärbung von SteriCoach® wird stattdessen durch ein maßgeschneidertes **Pflanzenextrakt** ermöglicht.

Der so gewonnene Farbstoff ist z.B. in **Brombeeren**, **Himbeeren** und **Kirschen** enthalten. Unverträglichkeiten gegen den Naturstoff gibt es nicht.

Um vergleichbare Eigenschaften zu Ihrem bevorzugten Desinfektionsmittel zu erreichen, benutzen wir ähnliche Inhaltsstoffe: Alkohol, Wasser und Rückfetter.

Selbstverständlich wurde die sichere Verwendbarkeit von SteriCoach® auch durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

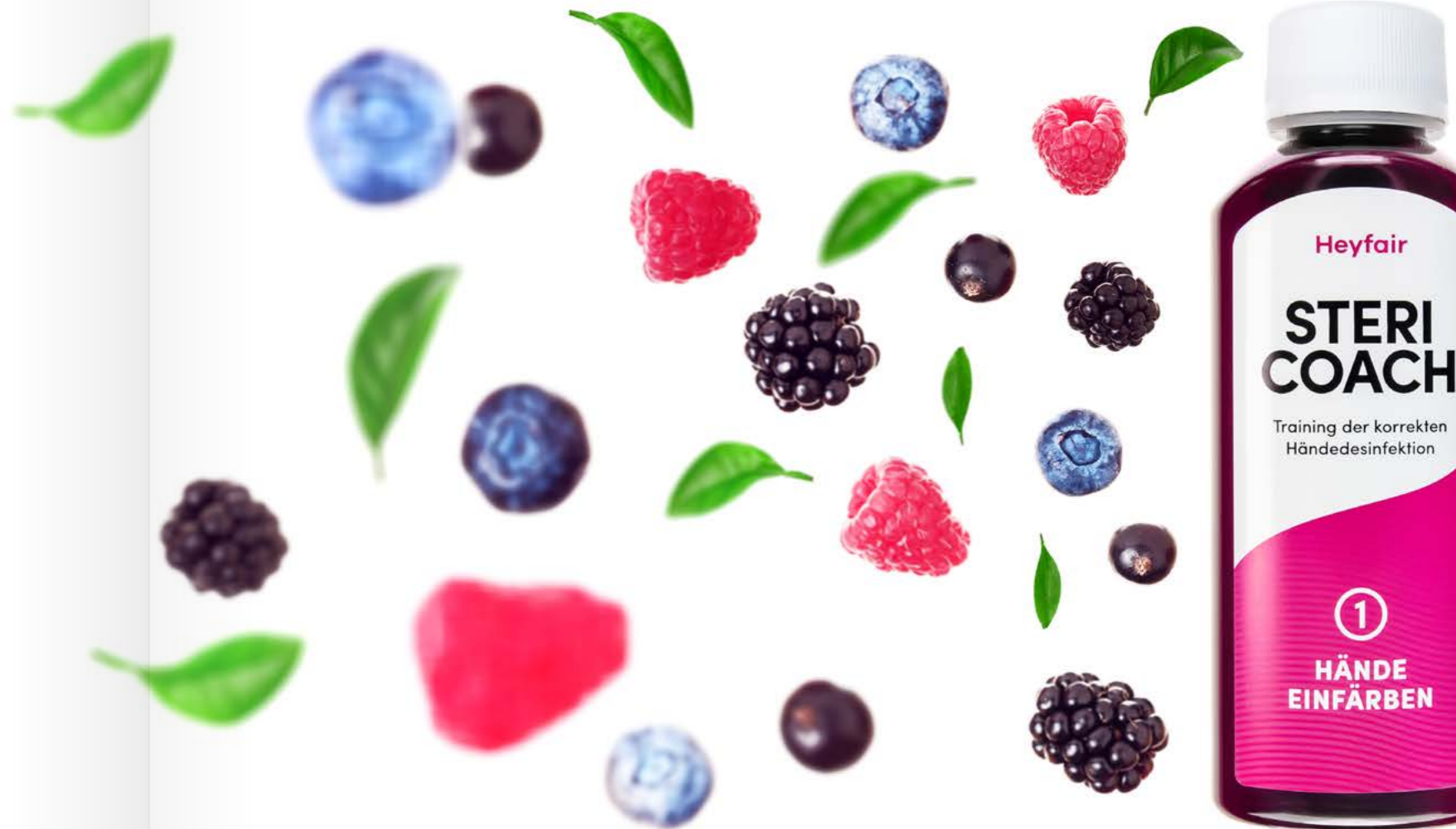



## Lieferumfang

# Alles was man zum trainieren braucht

Ein Schulungsset enthält:



150ml Färber & 150ml Entfärber



2x Farbkarten



1x Anleitung

Der Preis pro Set beträgt **34,90€ (Netto)**.

Damit sind durchschnittlich 50 Anwendungen möglich.

Ein Training kostet also nur **~1€**.

## Kontakt

# Wir freuen uns auf Sie!

Über 200 Unternehmen nutzen inzwischen SteriCoach®. Wenn Sie auch dazu gehören möchten oder Fragen haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf:

Telefon: +49 (0) 3641 - 508 201

E-Mail: [sales@heyfair.de](mailto:sales@heyfair.de)

Website: [www.heyfair.de](http://www.heyfair.de)



Deutschland  
Land der Ideen  
  
Ausgezeichneter Ort 2018  


  
KULTUR- UND  
KREATIVPILOTEN  
DEUTSCHLAND

Gefördert durch:

  
Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie

  
EUROPÄISCHE UNION  
Europäischer Sozialfonds

**Zusammen.**   
**Zukunft.**  
**Gestalten.**