

DENAA⁺

Absauginstrumente-Reiniger für Zahnmedizin



Zusammensetzung

- Wasser
- Mikroorganismen
- Geruchsentferner
- Entschäumer
- Oberflächenaktive Stoffe
- Emulgator (Rizinusöl)
- Minze Aroma
- PH Stabilisator

Suction Cleaner

DENAA+ Suction Cleaner wurde speziell für die Absaugvorrichtungen im zahnmedizinischen Sektor entwickelt. Die hinzugefügten hilfreichen Mikroorganismen beseitigen die organischen Abfälle sodass die Absaugvorrichtung bis in die kleinste Ecke schön und sauber bleiben. DENAA+ Suction Cleaner ist PH neutral und enthält keine korrosiven Inhaltsstoffe, die die Apparatur schädigen könnte.

- Entfernt den Biofilm in den Leitungen
- Beseitigt schlechte Gerüche
- Optimiert die lokale Mikroflora
- Langzeitwirkung
- Reduziert das Risiko bakterieller Infektionen
- Umweltfreundlich
- Schnell biologisch abbaubar
- Sicher in der Anwendung und nicht irritierend

Gebrauchsanleitung

In 300 bis 500ml lauwarmes Wasser 40ml (1 Dosierkappe) auflösen. Anschließend das Gemisch komplett mit der Absaugvorrichtung aufsaugen und mit klarem Wasser nachspülen.

Empfehlungen

-Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht in Kombination mit anderen Produkten verwenden. Nicht schlucken. Kontakt mit Augen vermeiden. In verschlossener Verpackung an einem trockenen Ort zwischen 10°C & 30°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verpackung

- Griffflasche mit Dosierkappe - 3l